



INSTRUKCJE UŻYCIA




Aby osiągnąć najlepszy rezultat, należy przykleić pasek tak jak pokazano na ilustracji.

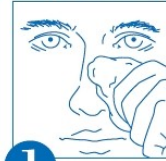


1 Umyj i wytrzyj do sucha nos.

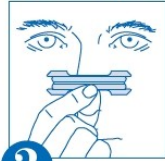

2 Zdejmij zabezpieczenie i przyklej pasek jak pokazano na ilustracji.

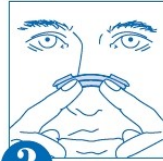

3 Delikatnie dociśnij pasek, by dobrze się trzymał.

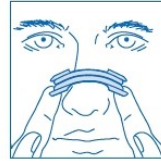

Pasek należy zdejmować **POWOLI**, najlepiej w trakcie mycia twarzy lub brania ciepłego prysznica. Końce paska należy pokuzować i następnie jednocześnie oba jego skrzydełka delikatnie odenwać.

Niedrożność nosa: Paski na nos Breathe Right mogą przynieść natychmiastową ulgę w niedrożności nosa, bez konieczności przyjmowania leków.

Chrapanie: Paski na nos Breathe Right mogą zmniejszyć lub wyeliminować chrapanie, poprzez zmniejszenie niedrożności nosa, która pojawia się w czasie snu. Dla uzyskania lepszego efektu, paski należy stosować regularnie, co najmniej przez tydzień.



Jak działają paski?

- Dwa elastyczne skrzydełka łagodnie unoszą się do góry.
- Specjalny klej wygodnie mocuje pasek na miejscu.
- Przewody nosowe otwierają się dzięki efektowi podniesienia i rozszerzenia nozdrzy.

Pomocne wskazówki

- Nie dotykać miejsca, w którym znajduje się klej.
- Do oczyszczenia tłustej cery należy użyć środka o działaniu ściągającym.
- Jeśli po użyciu skóra jest wysuszona, można użyć kremu nawilżającego.
- W przypadku skóry wrażliwej, na środek spodniej powierzchni paska można nałożyć kropelkę mleczka kosmetycznego (by pasek działał skutecznie, wystarczy by do skóry przylegały tylko jego końce).
- Aktywność fizyczna/sport: należy przykleić pasek na 30 minut przed rozpoczęciem ćwiczeń, aby zwiększyć przyleganie paska do spoconej skóry.

UWAGA: Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na otwarte rany, oparzenia słoneczne lub podrażnioną skórę. Do jednorazowego użytku. Każdy pasek należy użyć tylko raz. Nie stosować dłużej niż 12 godzin dziennie. Zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia wysypki lub podrażnienia skóry. Nie stosować u dzieci poniżej 5 roku życia. Opakowanie produktu zawiera naturalny lateks, który może wywołać reakcję uczuleniową.

DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Dystrybutor: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare sp z o.o.
Al. Armii Ludowej 26,
00-609, Warszawa

Producent: SmithKline Beecham plc.
EUCH CQ, Slough
SL1 3NW, Wielka Brytania

Breathe Right jest zarejestrowanym znakiem towarowym grupy GlaxoSmithKline.

