

Wartix

Srodek do szybkiego usuwania kurzajek/zdioni i st6p

ZAWARTO&

Opakowanie WARTIX zawiera:

- Dozownik z aplikatorem zawierający dimetyloeter
- Ulotk; informacyjna.
- Plastry ochronne (8 szt.)
- Gaziki czyszczace (16 szt.)

Zawartosc dozownika: 20 ml

Opakowanie WARTIX zawiera 15 dawek.

1. KURZAJKI IICH LECZENIE

Kurzajki stanowią czesty problem. Niemalze kazdy miat kurzajk; w jakimś momencie swojego zycia. Kurzajki sa wywoływane przez ludzkiego wirusa brodawczaka (HPV), który wyst;puje powszechnie w naszym srodowisku. Istnieje wiele roznych typow kurzajek. Zdecydowana wi;kszosc z nich wyst;puje na r;kach i stopach. Kurzajki wyst;pujace na r;kach, kolanach i twarzy maja, zwykle twarda, i szorstka, powierzchnia; i wygladaja, jak „kalafior”. Kurzajki wystepuja.ce na stopach, nazywane takze brodawkami, maja, zazwyczaj twarde krawedzie i czarne plamki w srodku. Wystepuj; na przedniej czesci podeszwy, pod gtowkami kosci srodstopia, na podstawie pi;ty i na palcach.

Kurzajki wygladaja nieestetycznie, mog; byc niewygodne a nawet bolesne. Maja^ takze tendencj; do nawracania, dlatego nalezy je leczyc mozliwie najszybciej i jak najskuteczniej. Za najskuteczniejsz; metode leczenia kurzajek powszechnie uznaje sie wymrazanie (nazywane takze krioterapia).

WARTIX wykorzystuje te metod; , jest skuteczny a dodatkowo wyjatkowo bezpieczny oraz tatywy w uzyciu. Plyn zamrazajacy aplikowany jest bezposrednio na kurzajk; , ktora ulega wymrozeniu az po rdzen. Proces wymrazania moze spowodowac zaczerwienienie lub pojawienie si; ; p;cherzyk6w na sk6rze, co jest zupetnie normalnym zjawiskiem. Zazwyczaj wystarcza pojedyncze zastosowanie WARTIX. Po 10 - 14 dniach od wymrozenia, kurzajka odpada, pozostawiajac zdrowy, zregenerowany nask6rek.

2.SPOSOBUZYCIA

NIE nalezy zdejmowac plastikowego aplikatora z dozownika!

Zwrocic kurzajke ku gorze tak, aby zmiescila si; w komorze aplikatora (skierowanego ku dotowi). Nast;pnie przytocz aplikator tak, by krawedzie komory szczelnie przylegaly do skory wokdt kurzajki.

Zdjac aplikator z kurzajki. W tym momencie moze wystapic uczucie mrowienia lub niewielkiego bolu.

Trzykrotnie przycisnac dozownik kciukiem, aby uwolnic plyn zamrazajacy. Przytrzymac aplikator na kurzajce przez 60 najmniej 10 sekund.

Po zastosowaniu nalezy oczyscic aplikator gazikiem czyszczacym, znajduj;acym si; w opakowaniu WARTIX.

Jezeli po zastosowaniu WARTIX kurzajka jest uniesiona i/ lub bardzo wzraliwa, mozna zakleic ja, plastrem ochronnym znajduj;acym si; w zestawie.

UWAGA!

W wi;kszosci przypadk6w pojedyncze zastosowanie WARTIX jest wystarczajace. Jezeli kurzajka nie odpadne w ciaciu dw6ch tygodni od wymrazania, zabieg mozna powtdrzyc. Czasami pomocne jest, przed zastosowaniem WARTIX, namoczyć kurzajk; w wodzie, zeby ja zmi;kczyc. Jedna, kurzajk; mozna wymrazac-4 maksymalnie cztery razy (przy czym nalezy zachowac dwutygodniowy odst;p czasu mi;dzy kolejnymi zabiegami). Jezeli po czterech prdbach kurzajka nie odpadne, najlepiej zgotosic si; do lekarza. W przypadku matego grupy brodawek potozonych blisko siebie, najlepiej wymrozic kazdq z osobna, zachowuj;ac dwutygodniowy odst;p czasu mi;dzy kolejnymi zabiegami.

Jezeli nie s; Parfstwo pewni, czy zmiana skbna jest kurzajka, najlepiej skonsultowac si; z lekarzem.

3.POLECZENIU

W trakcie lub bezposrednio po wymrazaniu kurzajki moze wystpic uczucie mrowienia lub niewielkiego b6lu.

Po zabiegu moze powstac pecherzyk. NIE NALEZY GO PRZEKIUWAC!

P;cherzyk zazwyczaj jest oznaka, skutecznego leczenia.

Prosz; nie skubac ani nie drapal zamrozonej kurzajki.

Po zabiegu kurzajka powinna pozostac czysta - nalezy unikac jej zainfekowania.

Mozna normalnie ptywac, myt si; i k6pac.

Zamrozon\$ kurzajk; mozna zakleic plastrem ochronnym zawartym w opakowaniu.

4. DZIALANIA NIEPOZADANE

Proces wymrazania moze prowadzic do miejscowego wyst;powania biatych plamek na sk6rze (zmniejszenie pigmentacji sk6ry).

Plamki te stopniowo znikna.. **Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej ulotce moze prowadzic do odmrozenia, uszkodzenia lub powstania blizn na sk6rze.** Jezeli dojdzie do stanu zapalnego i/ lub jakichkolwiek innych powiktari, nalezy zgotosic si; do lekarza.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie wolno stosowac WARTIX:

U dzieci ponizej 4. roku zycia.

U chorych na cukrzyc; lub z zaburzeniami krazenia.

W przypadku podraznienia lub zapalenia sk6ry.

Jezeli nie sa. Panstwo pewni, ze dana zmiana jest kurzajkq.

W miejscach, w kt6rych wyst;puje delikatna skbra, takich jak: twarz, szyja, pachy, biust i posladki.

W leczeniu brodawek na narzadach ptiowych.

W leczeniu znamion, (owtosionych) pieprzykow ani zadnych innych zmian sk6mnych maj;acych dziwny wyglad.

U os6b, ktore sa uczulone na zimno.

W skojarzeniu z zadn\$ inna, metoda, leczenia kurzajek.

UWAGA

Przechowywac w miejscu niedost;pnym dla dzieci. Zbiornik pod cisnieniem: chronic przed swiatlem slonecznym i nie ekspozowac na temperatury przekraczajace 50°C Nie przektuwat nie palic- nawet po zuzyciu. Skrajnie tatwopalny. Nie rozplylac na otwarty ptomierl ani na rozzarzone materialy. Przechowywac z dala od zrodet zaptonu.

Kobiety w dazy lub karniace piersia, przed zastosowaniem WARTIX powinny skonsultowac si; z lekarzem.

W razie w*tpliwosci nalezy skonsultowac si; z lekarzem!